



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie  
 ☒ Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 itransfusion.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration  
 D +41 31 384 23 08

Berne, 14 février 2025 cni/sme – Ss25-1F

## Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2025-01

### Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

	Donneur 2025-11				Donneur 2025-12				Patient 2025-13			
Groupe Sanguin résultat final	AB <input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input checked="" type="checkbox"/>	AB <input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input checked="" type="checkbox"/>	AB <input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input checked="" type="checkbox"/>
RhD	pos <input checked="" type="checkbox"/>	neg <input type="checkbox"/>	D <sup>weak</sup> <input type="checkbox"/>	D <sup>variant</sup> <input type="checkbox"/>	pos <input checked="" type="checkbox"/>	neg <input type="checkbox"/>	D <sup>weak</sup> <input type="checkbox"/>	D <sup>variant</sup> <input type="checkbox"/>	pos <input checked="" type="checkbox"/>	neg <input type="checkbox"/>	D <sup>weak</sup> <input type="checkbox"/>	D <sup>variant</sup> <input type="checkbox"/>
Rh-Phénotype	C <input checked="" type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>	C <input checked="" type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>	C <input checked="" type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>

→ Les isoagglutinines sont toujours clairement identifiables. Si ce n'est pas le cas, l'analyse a été effectuée à partir du mauvais tube.  
 → Les isoagglutinines ne peuvent pas être déterminées à partir du tube de sérum, mais à partir du surnageant des cellules des 3 tubes.

### Recherche anticorps

	Résultat	
Sérum patient 2025-13	négatif <input type="checkbox"/>	positif <input checked="" type="checkbox"/>

Spécification des anticorps		
anti-Jk <sup>a</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Test de compatibilité

	2025-13 Sérum patient		
IAT	négatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2025-11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ec donneur 2025-12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Remarques

na

